



Gebrauchsanweisung

Das Medtronic Wasserflaschensystem Clean Water ist eine eigenständige Wasserversorgung für Instrumente und ermöglicht die Intensiventkeimung und Biofilmbeseitigung der Wasserwege im Behandlungsgerät.

Für die Behandlung kann aufbereitetes Wasser (z. B. Alpron® Lösung) oder Trinkwasser verwendet werden.

Die Desinfektion der Wasserwege (z. B. Bilpron® Lösung) wird wöchentlich und während längerer Standzeiten durchgeführt.

Wasserflasche befüllen

Das Abschrauben der Wasserflasche zum Befüllen kann im eingeschalteten Zustand des Gerätes erfolgen. Ein Abschaltventil in der Wasserflaschenaufnahme verhindert, dass Druck entweicht.

- Wasserflasche (Pos. 2) mit Trinkwasser oder Alpron Konzentrat befüllen (Mischung gemäß Herstellerangaben der ALPRO MEDICAL GMBH beachten).
- Wasserflasche in die Flaschenaufnahme (Pos. 1) einschrauben; der Druck wird automatisch aufgebaut.
- Behandlung beginnen.



Abb. 1) Montagebeispiel: Wasserflasche am Behandlungsgerät

- 1 Wasserflaschenaufnahme
- 2 Wasserflasche
- 3 Füllhöhe
- 4 Anbauwinkel

! Zu beachten:

- Die gebrauchsfertige Alpron-Lösung ist täglich frisch anzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass sich immer genug Wasser bzw. Alpron-Lösung in der Wasserflasche befindet. (Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Alpron Gebrauchsanleitung).
- Bilpron kann über das Wochenende oder auch für längere Standzeiten (z.B. Urlaub) im Behandlungsgerät verbleiben. (Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Bilpron Gebrauchsanleitung).

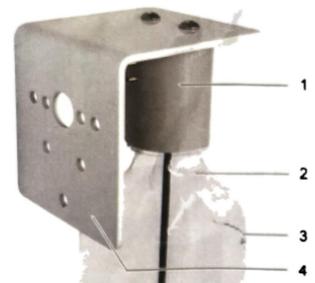


Abb. 2) Anbauwinkel mit Wasserflaschenaufnahme für nachträgliche Installation

Wasserflasche reinigen

Das Medtronic Wasserflaschensystem Clean Water ist leicht zu pflegen. Folgende Reinigungsmethoden sind geeignet:

- Spülen Sie mit heißem Wasser und Geschirrspülmittel. Die PET-Flaschen können mit bis zu 50° C heißem Wasser gespült werden.
- Verwenden Sie eine Flaschenbürste bei jeder Reinigung. Wir empfehlen die Verwendung von Schaumstoff- oder Lammfellbürsten, um die Flaschenoberfläche nicht zu verkratzen.

! Zu beachten:

- Die Wasserflasche nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Die Wasserflasche sollte nach einem halben Jahr im Einsatz ausgetauscht werden. Verkratzte oder undurchsichtig gewordene Wasserflaschen müssen umgehend ausgetauscht werden.



Abb. 3) Clean Water System mit Feinfilter

! Info zum Einbau des Reduzierventils:

- Das Reduzierventil ist mit der Luftleitung zu verbinden und vor der Wasserflasche einzubauen – siehe Foto Montagebeispiel (Abb. 4).



Abb. 4) Einbaubeispiel des Reduzierventils

**Alpron und Bilpron sind Produkte der ALPRO MEDICAL GMBH.*

Alles aus einer Hand!

Medtronic hat eine eigene Entwicklungsabteilung, einen eigenen Werkzeug- und Formenbau und produziert mit einer Fertigungstiefe von über 90 %. Dadurch können Produktinnovationen schnell umgesetzt und ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden. Medtronic ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

MEDTRONIC

medizinisch-elektronische Geräte-Gesellschaft m.b.H.

Riedelbach | Technologiepark
In den Esterwiesen 7
61276 Weindorf | Germany

Tel +49 (0) 6083 95989-0
Fax +49 (0) 6083 95989-11
info@medtronic-dental.de
www.medtronic-dental.de