

NPB-190

- Gerät ohne Sensor einschalten
- Gewünschte Einstellungen vornehmen
- Obere und untere Alarmeinstelltaste gleichzeitig drücken, bis im Display "1" erscheint
- Zum Speichern der Werte obere Alarmeinstelltaste drücken
- Ein dreimaliges helles Piepsen bestätigt die Speicherung

NPB-290

- Gerät ohne Sensor einschalten
- Gewünschte Einstellungen vornehmen
- Obere und untere Alarmeinstelltaste gleichzeitig drücken, bis im Display "1" erscheint
- Rechte obere Pfeiltaste drücken bis im Display "9" erscheint (Hinweis: nach Erreichen von Menüpunkt "5" wird der Tastendruck zweimal nicht beantwortet)
- Obere Alarmeinstelltaste drücken
- Ein dreimaliges helles Piepsen bestätigt die Speicherung
- Menüpunkt 10 aktiviert die Werkseinstellungen

NPB-195/295

- Gerät ohne Sensor einschalten
- Gewünschte Einstellungen vornehmen
- Die beiden rechten Buttons der unteren Buttonleiste (LICHT und Kontrast) gleichzeitig drücken bis sich die Menütex te ändern
- Den linken Button PARAMT drücken
- Den Button SPEICH drücken
- Den Button JA drücken
- Ein dreimaliges helles Piepsen bestätigt die Speicherung

N-395

- Gerät einschalten und gewünschte Einstellungen vornehmen
- Die beiden rechten Buttons der unteren Buttonleiste (LICHT und Kontrast) gleichzeitig drücken bis sich die Menütex te ändern
- Den linken Button PARAMT drücken
- Den Button SPEICH drücken
- Den Button JA drücken
- Ein dreimaliges helles Piepsen bestätigt die Speicherung