




Schwesternruf NPB-290/295

Der NPB-290/295 besitzt ein eingebautes Relais für den Abschluß an die Schwesternrufanlage. Das Pulsoximeter kann also direkt an eine Schwesternrufanlage angeschlossen werden.

Für den Anschluß des Schwesternrufes an den NPB-290/295 benötigen Sie folgende Teile. Diese Teile können Sie auch als Kit bei Nellcor Puritan Bennett bestellen.

1. 15pol. Sub-Min-D Stecker
2. Gehäuse
3. 2 Stehbolzen, 4/40inch, für Sub-D Buchse am NPB-290/295
4. diese Musterbauanleitung

Je nachdem ob Sie eine Öffner- oder Schließerfunktion für Ihre hausinterne Rufanlage benötigen, müssen Sie den Sub-Min-D Stecker nach dem entsprechenden Anschlußplan anschließen.

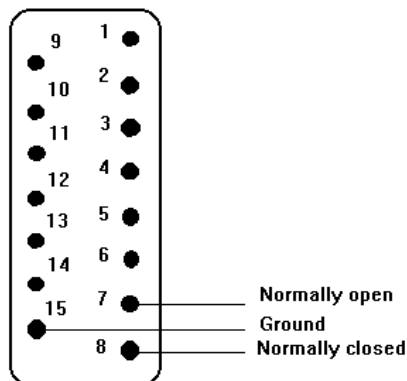

Sie sollten aus Sicherheitsgründen nur Kabel mit Öffnerfunktion verwenden, da diese auch bei Kabelunterbrechung einen Alarm auslösen.

Es kann kein fertig konfektioniertes Kabel bezogen werden, da die einzelnen Bedürfnisse der Krankenhäuser bezüglich Kabellänge und hausseitiger Anschlußkontaktierung zu vielfältig sind. Wir können daher nicht nach Spezialwünschen von Kunden fertigen und liefern. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Die Herstellung und Verwendung des Kabels geschieht auf eigenes Risiko und Verantwortung!

Es kann auch das Schwesternruf kabel für den NPB 190/195 verwendet werden. Jedoch sind hierbei die geänderte Anschlußkontaktierung des Steckers und das einzubauende Reed-Relais und die Schutzdiode zu beachten.